

## **DOMANDE FREQUENTI**

***Quante immagini 3D possono essere memorizzate quando utilizzo il Condor intra-orale?***

Il numero di immagini memorizzabili va in base alla capacità del disco rigido del PC, ma possono essere trasferite su una memoria esterna;

***Che tipo di immagini possono essere memorizzate?***

Le estensioni consentite sono .stl o .plv;

***Come possono essere condivisi i dati con i collaboratori o con i colleghi?***

I file di questo tipo possono essere facilmente inviabili via e-mail o caricati s'un server FTP;

***Può un laboratorio odontotecnico utilizzare i dati nelle sue applicazioni CAD?***

Sì, solo se il software CAD utilizzato dal laboratorio consente di importare un file .stl aperto;

***Che cos'è un file .stl aperto?***

Un file .stl aperto è un file che non contiene codifiche aggiuntive e garantisce la compatibilità di dati software inseriti da terzi. I file .stl sono i più utilizzati per i file 3D del CAD/CAM dentale;

***Il Condor viene consegnato solo?***

No, il Condor viene consegnato completo del suo PC (versione Windows 8 64bits), il suo software integrato, un'arcata dentale per esercitarsi ed una chiavetta USB;

***Qual è la durata della garanzia del Condor?***

La garanzia del Condor è valida per 2 anni;

***Chi installa il Condor?***

Il Condor Scan, grazie alla sua facilità di utilizzo, può essere installato da soli; il distributore ufficiale comunque fornirà la formazione necessaria, oltre che un servizio completo per la manutenzione ed assistenza. In caso di dubbi si può ricorrere a video-tutorial o guide rapide;

***Quante sono le licenze annuali obbligatorie per l'utilizzo del Condor?***

Non sono associate garanzie annuali obbligatorie;

***Il Condor può connettersi ad un fresatore?***

Sì, i file di progetto del Condor possono essere inviati sia ad un fresatore che ad una stampante 3D;

***Con quale sistema operativo è compatibile il Condor?***

Per sfruttare al meglio le sue funzioni, il Condor è dotato di un computer portatile che utilizza il sistema operativo Linux;

***Come si collega lo scanner intra-orale al pc?***

Direttamente al PC, tramite USB port 3.0;

***Quale tecnologia lo gestisce?***

Il Condor è gestito da un sistema di video fotogrammetria ed un software esclusivo;

***Come si pulisce il Condor?***

Lo scanner può essere pulito con una soluzione disinfettante.